

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT SỮA ĐIỆN ĐÔI TỰ ĐỘNG BISTOS BT-100

MADE IN KOREA

Hi bebe Plus

**bistos**



## CẤU HÌNH CHUNG

Màn hình: 3" LCD MONO

3 Chế độ: Hút chuẩn, sử dụng bộ nhớ, Mát xa

Áp lực hút: 10 mức

Pin sạc: 7.4 V Li-ion Polymer (900mA)

Kích thước máy nhỏ gọn: 132×95×49mm

Trọng lượng: 260g

Tự động tắt sau 30 phút không sử dụng



BPA Free / Latex Free

## MÀN HÌNH HIỂN THỊ

Tuổi thọ pin: đo được khoảng 5000 lần

Kết nối nguồn adapter

Dung lượng pin

Thời gian hút sữa

Mức áp lực hút sữa

Chế độ xoa bóp

Chế độ hút sữa



## I. LẮP ĐẶT

Bước 1: Lắp đặt bình hút như hình vẽ.

Bước 2: Kết nối dây dẫn với máy chính và bình hút sữa







# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT SỮA ĐIỆN ĐÔI TỰ ĐỘNG BISTOS BT-100

MADE IN KOREA



## II. BẮT ĐẦU HÚT SỮA: CÓ 2 CHẾ ĐỘ


### 1. CHẾ ĐỘ HÚT CHUẨN

**Bước 1:** Nhấn nút nguồn  để khởi động và máy bắt đầu hoạt động hút.

**Bước 2:** Nhấn phím  trên bàn phím để chọn một trong hai chức năng: chức năng hút sữa  hoặc chức năng mát xa 








**Bước 3:** Chọn áp lực hút cho phù hợp bằng cách tăng hay giảm hiện trên màn hình từ 1 đến 10.



Chọn mức áp lực hút phù hợp với mình. Phím  giảm mức áp lực.  
phím  tăng mức áp lực.



Sau khi sử dụng xong nhấn nút nguồn  tắt máy.

### 2. CHẾ ĐỘ HÚT SỬ DỤNG BỘ NHỚ

Để thiết lập chương trình riêng sử dụng phù hợp với mình khi bật nguồn lên không cần thay đổi mức áp lực hút làm theo những bước sau đây:

- Nhấn nút mở nguồn  tiếp theo sau đó nhấn và giữ phím  khoảng 3 giây cho tới khi biểu tượng  nhấp nháy xuất hiện trên màn hình, lúc này chọn mức áp lực phù hợp với mình ( Dùng phím  tăng hoặc phím  giảm trên màn hình từ mức 1 đến 10. Tiếp theo đó nhấn và giữ phím  khoảng 5 giây tới khi biểu tượng  không còn nhấp nháy và đứng yên trên màn hình thì chức năng cài đặt riêng đã được lưu.

- Khi bật nguồn máy tự động hút giống như chương trình đã cài đặt, nếu muốn thay đổi trong chương trình đang cài đặt thì nhấn phím   để thay đổi.

- Muốn tắt chức năng cài đặt sẵn nhấn giữ 3 giây phím  thì trên màn hình tắt 


## TƯ THẾ VẶT SỮA ĐÚNG



(O) Đúng



(X) Sai

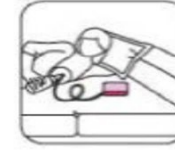

(X) Sai



(X) Sai

## LƯU Ý: VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

### Vệ sinh:

- Phần máy chính: dùng khăn sạch khô để vệ sinh bên ngoài
- Tháo rời các bộ phận tiếp xúc với sữa mẹ để vệ sinh trước lần dùng đầu tiên và sau mỗi lần sử dụng.
- Ngâm tất cả các bộ phận trong nước nước ấm và rửa bình chuyên dụng trong 5 phút.
- Sử dụng khăn mềm sạch hoặc bàn chải mềm chuyên dụng để làm sạch các bộ phận và rửa lại bằng nước sạch.

**Tiệt trùng:** Đổ nước vào nồi để ngập tất cả các bộ phận. Đun sôi nước trong 5 phút hoặc sử dụng máy tiệt trùng chuyên dụng.

**Bảo quản:** Bảo quản các bộ phận ở nơi khô ráo sạch sẽ và thoáng mát khi không sử dụng



## TRUNG TÂM BẢO HÀNH:

CÔNG TY TNHH TM & DVKT NGUYỄN LÂM  
ĐCLH: 52 Bé Văn Đàn, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM  
Tel: (028) 3849 4717 – 3949 1858 – 3949 1860  
Khi có nhu cầu, xin quý khách liên hệ với nơi bán hoặc  
Trung tâm bảo hành để được phục vụ tốt nhất.

## NHÀ SẢN XUẤT:

Bistos Co., Ltd.

7th Fl., A Bldg., Woolim Lions Valley 5-cha, 302,  
Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si,  
Gyeonggi-do, Korea

